

RABLISS

新型コロナウイルス

NEW

# 抗原検査キット

検査1回分

COVID-19 AG

変異株対応

## 唾液

によるセルフ検査

99.3%  
高精度

8分  
迅速判定!

今、感染しているかその場でわかる

大切な家族や自分を守るために、  
気になったらすぐに検査を!



## 抗原検査キットとは?

抗原検査キットとは、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを迅速に判定できる研究用試薬の検査キットです。  
PCR検査と同様に、現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを誰もが簡単に知ることのできる研究用キットです。  
PCR検査よりも簡易・迅速に検査できます。

当社の抗原検査は唾液による検査になります。痛いのが苦手な方にもおすすめです。  
検査に必要なものはすべてセットになっているため、手軽に検査ができる検査キットです。



その場でわかる




セルフチェック




迅速8分で検出


## 誰でも簡単 4ステップ で検査完了

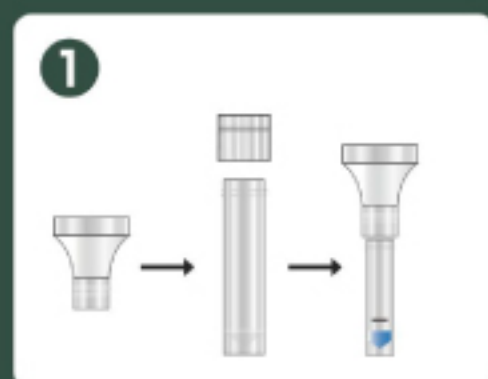


1 検体希釈液入り容器のキャップを外し、ろうとをセットします。

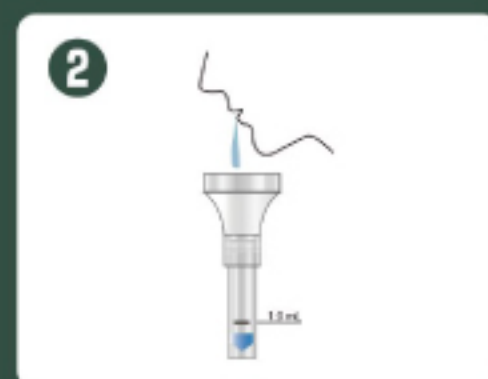

2 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。

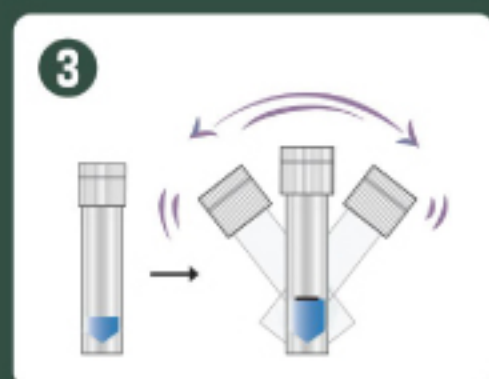


3 キャップを閉めて、容器をよく振ってください。

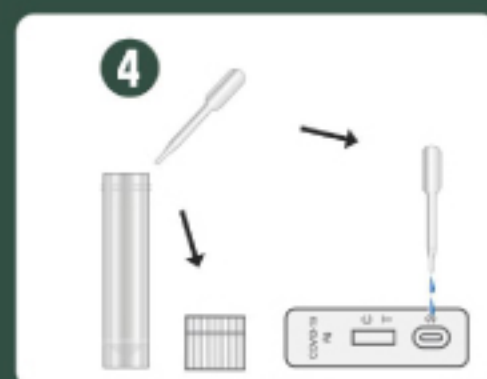


4 キャップを外し、スポイトで抽出します。テストプレートに検体を3滴落とし、8分間待ちます。


# 誰でも簡単 4ステップ で検査完了

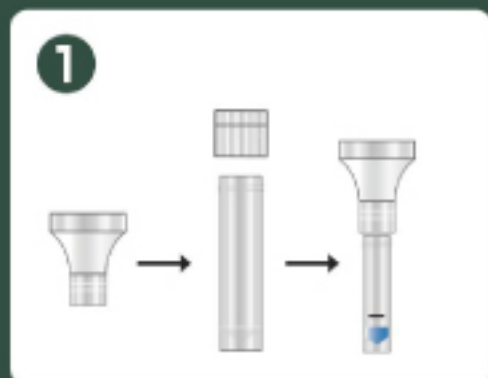


1 検体希釈液入り容器のキャップを外し、ろうとをセットします。

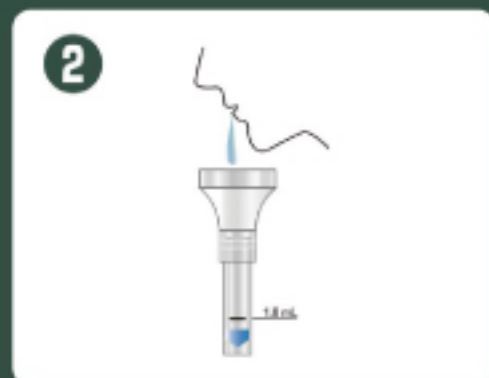

2 1mLのラインに達するまでろうとに唾液を吐き出し、ろうとを外します。

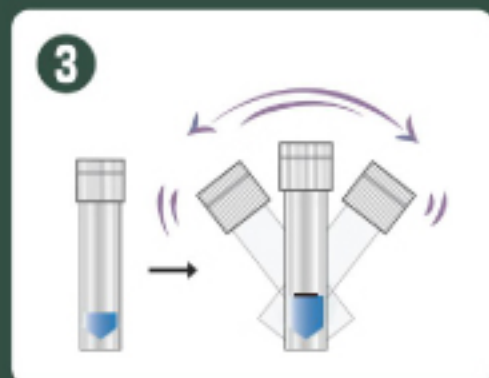

3 キャップを閉めて、容器をよく振ってください。

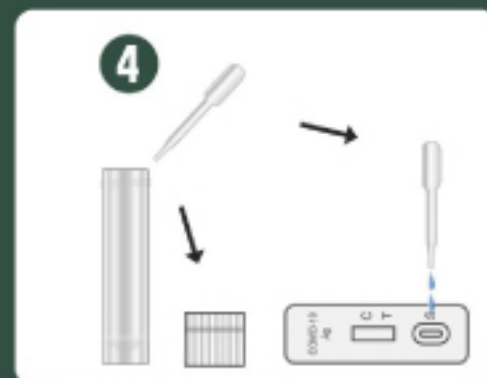

4 キャップを外し、スポイトで抽出します。テストプレートに検体を3滴落とし、8分間待ちます。

## RABLISS こんな不安はありませんか？

### 検査ができない不安

- 近くに検査できる病院がない
- 体調に不安があってもなかなか検査してもらえない

### 結果を待てない不安

- PCR検査は時間がかかる
- 今すぐ検査結果を知りたい

### 家族への不安

- 長期休暇の帰省前に感染を確認したい
- 高齢、乳幼児の家族が心配だから検査を受けたい

### 感染の不安

- 周囲で濃厚接触者が出た
- 直近で外出が多く体調が悪い気がする



そのお悩み！

## 解決

できます！

変異ウイルス対応

正診率 **99.3%** 高精度の検出が可能！

- ✓ 検査結果が8分で出る！
- ✓ 自宅、会社で検査結果がわかる！
- ✓ 検査をすることでお客様に安全性を示せる
- ✓ 2年間の有効期限があるので、備蓄ができる

気軽に検査をして、自分も安心、周りも安心！

## 当社抗原検査キット特長

<p>① 日本国内での臨床試験</p> <p>安心してお使い頂く為に臨床試験を行いました。 ※ 協力大学【昭和大学薬学部】</p>	<p>② 自宅でスピード検査</p> <p>8 min</p>	<p>③ 痛みのない唾液検査</p> <p>口内の唾液を採取するだけ。鼻腔咽喉を拭いたり、採血の必要なし。</p>	<p>④ 簡単セルフチェック</p>
---	---------------------------------	---	--------------------

## 安心してご利用いただける理由

### 安心ポイント1

#### 『世界中で認証・登録許可証を取得』

- ヨーロッパ連合 (EU) 加盟国の規格を統一した安全基準を満たしております。
- 製造所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格ISO13485を取得しております。
- ドイツ連邦医薬品医療機器研究所 (BfArM) のリストに登録しております。



### 安心ポイント2

#### 『臨床試験により高い精度が実証済』

感度	(陽性を陽性と判定する割合)	<b>98.6%</b>																					
特異度	(陰性を陰性と判定する割合)	<b>99.6%</b>																					
正診率		<b>99.3%</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="2">Gold standard reagent</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>陽性</th> <th>陰性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Test reagent</td> <td>陽性</td> <td>148</td> <td>1</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>陰性</td> <td>2</td> <td>249</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>150</td> <td>250</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>					Gold standard reagent		Total	陽性	陰性	Test reagent	陽性	148	1	149	陰性	2	249	251	Total		150	250	400
		Gold standard reagent			Total																		
		陽性	陰性																				
Test reagent	陽性	148	1	149																			
	陰性	2	249	251																			
Total		150	250	400																			

- 権威ある2つの機構での臨床試験を実施

- ① 昭和大学薬学部による臨床試験済み
- ② 世界的に有名なスイスのジュネーブ大学病院による臨床試験済み

■ 品名：新型コロナウイルス抗原検査キット COVID-19 AG ■ J A N：4573284127719 ■ キット内容：テストプレート×1枚 検体抽出用スポイト×1本  
 ■ 型番：K0264 ■ 使用期限：製造から2年 ■ 専用検体希釈液入り容器×1本 検体採取用ろうと×1本  
 検査手順説明書×1枚

#### 【使用上の注意】

●ご使用に際しては説明書をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用ください。●本製品は、20歳以上の方を対象としております。●本キットおよび付属品は、医療機器ではなく研究用製品となります。●本製品は、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。●本製品は、研究や調査を目的としたもので本検査以外の目的には使用できません。●本製品を用いた検査判定はいかなる意味でも医療診断や治療を目的とするものではありません。●本製品は小児の手の届かない所に保管してください。●本製品の的外観、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元：小林薬品株式会社 大阪市中央区本町2丁目3番8号 <お問合せ> 06-6314-6185 <Email> sales@kobayashiyakuhi.com  
 ●開発中の製品につき、法律上、今後の説明表記が変更になる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。●写真・イラストはイメージです。